

# Tengervizes orrspray

## Orvostechnikai eszköz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Izotonizált tengeri só oldat az orr nyálkahártyájának nedvesítésére, az orrüregek gyengéd tisztítására, a por, pollen orrüregből történő eltávolítására, valamint az eldugult orr kiegészítő kezelésére.

Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót! Kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

Dr. Theiss-féle Tengervizes orrspray adagolófejjel ellátott hajtógáz nélküli orvostechnikai eszköz.

**Összetétel:** 1 ml oldat tartalmaz: 1 ml izotonizált tengervizet, mely 0,9%-os nátrium-klorid oldatnak felel meg; benzalkónium-kloriddal és benzilalkohollal tartósítva.

**Adagolási forma és tartalom:** 20 ml oldat

### Felhasználás:

Egy természetes megoldás – adagolófejjel ellátott hajtógáz nélküli orvostechnikai eszköz – az orr nyálkahártyájának nedvesítésére és az orrüreg enyhe tisztítására, különösen a levegő pollen és por tartalmának növekedése esetén.

A kupak eltávolítása után többször erősen nyomja meg az adagolófejet, míg az első permetkifújás meg nem történik. Aztán helyezze az orrüregbe és nyomja le az adagoló részt. A használat során esetlegesen az orrgaratba került oldat lenyelhető. Felnötteknek és gyermekeknek egyaránt ajánlott. Terhes nők és szoptató anyák is alkalmazhatják.

### Alkalmazás időtartama:

A termék hosszú távon is problémamentesen használható.

### Az orrüreg nedvesítésénél:

1-2 permetbefújás mind a két orrnyílásba.

### Tisztításnál:

2-3 permetbefújás mind a két orrnyílásba.

### Kölcsönhatások:

Más készítményekkel egyidejűleg történő használatánál kölcsönhatás ez idáig nem ismert.

### Ellenjavallatok:

A Tengervizes orrspray-t nem szabad alkalmazni az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység vagy intolerancia esetén.

### Figyelmeztetés:

Higiéniailag okok miatt az orrsprayt csak ugyanazon személy használhatja. Felbontás után ne használja 6 hétnél tovább! Gyermekek elől gondosan elzárva tárolandó! Orroperáció vagy balesetek után a készítmény alkalmazásához kérje kezelőorvosa tanácsát. Az orrspray lejárati ideje a dobozon és a palackon egyaránt megtalálható. A lejárati idő után már ne használja a készítményt!

**Eltarthatóság:** A lejárati dátum a dobozon és a címkén található.

A lejárati idő után ne használja a terméket!



### Mellékhatások:

Eddig nem ismertek. Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, mely nem szerepel ebben a használati útmutatóban, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez, és ezt jelezze a gyártó felé is.

### Tetszett a termék Önnek?

Javastralval vagy kérésével kérjük, hogy forduljon a gyártóhoz.

Tárolás 5 °C – 25 °C fok között.

Lejárati idő  és gyártási szám :  
Lásd a doboz alján!

20 ml



Gyártó

Dr. Theiss Naturwaren GmbH  
Michellinstr. 10,  
D-66424 Homburg/Németország  
Made in Germany

A használati útmutató  
ellenőrzésének dátuma:  
11/2021



  
**DR. THEISS**



Tárolás 5 °C – 25 °C fok között.



Kérjük, olvassa el a mellékelt használati útmutatót.



Gyártó



Gyártási szám



Lejárati idő

00722211  
620913/2