

Használati útmutató

Gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, mert fontos tájékoztatást ad arról, mit kell figyelembe vennie a termék használatakor.

Lacalut DENT Extra rögzítőkrém

Orvostechnikai eszköz

Összetétel: Mixed Sodium / Calcium Salts of Polymethylvinylether / Maleic Anhydride, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, Aroma, Propylparaben, Methylparaben, CI 14720.

Tartalom: **40 g**

Felhasználási terület: műfogsor rögzítéséhez

Óvintézkedések és különleges figyelmeztetések:

Csak egészséges (sértetlen) nyálkahártyán alkalmazható!

Adagolási utasítás, az alkalmazás módja és időtartama:

Tisztítsa meg a műfogsort és a felső, ill. az alsó fogsor mélyedéseibe egyenletesen vigye fel a Lacalut rögzítőkrémet (nedves műfogsorra is felvihető). Ezután helyezze fel a műfogsort és néhány másodpercig szorítsa össze az állkapcsát. Kb. 5 perc várakozás után fogyaszthat ételt.


Az adagolás egyénileg határozható meg. Használat után gondosan zárja be a tubust.

Ellenjavallat: Az összetevők valamelyikével szembeni túlérzékenység esetén.

Mellékhatások: Egyes esetekben a nyálkahártya túlérzékenységi reakciókat mutathat. Amennyiben mellékhatást tapasztal, tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

Kölcsönhatás egyéb szerekkel: eddig nem ismeretes.

Gyermekek elől elzárva tartandó!

A faltkartonon és a tubuson feltüntetett lejárati idő  után nem használható fel!

Legfeljebb 30°C-on tárolandó!

Gyártja: Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstr. 10, 66424 Homburg/Németország

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.,
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

www.lacalut.hu

Orvostechnikai eszköz.

