

# ClinSin med

Készlet az orr- és a melléküregek öblítésére

Ez az útmutató tartalmazza a **ClinSin med** eszköz használatára vonatkozó információkat. A **ClinSin med** 12 éves kor feletti gyerekek és felnőttek számára alkalmazható orvostechnikai eszköz.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel azok a termék megfelelő használatával kapcsolatos fontos információkat tartalmazzák. Tartsa meg a használati útmutatót, hogy szükség esetén újra elolvashassa. Bármilyen kérdés felmerülése esetén konzultáljon orvosával, gyógyszerészeivel.

A **ClinSin med** orvostechnikai eszköz egy készlet, amely 1 flakont és 16 tasak felforralt vízben oldható port tartalmaz az orr- és melléküregek öblítésére, tisztítására, egészségmegőrzésére és műtét utáni tünetek kezelésére.

## Ez az orvostechnikai eszköz megelőzés és kezelés céljából egyaránt használható:

1. arcüreggyulladás,
2. különböző eredetű nátha (allergia és fertőzés),
3. orr- és melléküreg műtéti beavatkozások előtt és után,
4. magas pollentartalmú vagy rendkívül száraz levegő esetén,
5. ornyálkahártya nedvesítésére az orr gyógyszeres kezelése után,
6. az orr- és melléküregek egészségének megőrzésére.

A **ClinSin med** orvostechnikai eszköz izotóniás (fiziológiás) és hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítésére egyaránt alkalmas. Az izotóniás oldat természetes módon tisztítja meg az orrot a felgyülemlett allergénektől, baktériumoktól és vírusoktól.

A tisztításon kívül a hipertóniás oldat össze is húzza a nyálkahártyát fertőzések, allergiák (szénanátha), arcüreggyulladás és a melléküregekben felhalmozódott váladék esetén.

## HASZNÁLAT MÓDJA:

Izotóniás (fiziológiás) alkalmazásra 1 tasak készítményt kell feloldani 240 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítéséhez 2 tasak készítményt kell feloldani 240 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A **ClinSin med** orvostechnikai eszköz felnőttek és 12 év feletti gyerekek esetében alkalmazható. Naponta egyszer vagy kétszer kell öblíteni, legalább egy órával a szabad levegőre való kimenetel (amennyiben a külső hőmérséklet 19°C-nál alacsonyabb), ill. lefekvés előtt.

**Izotóniás (fiziológiás) oldat** – 1 tasak tartalmát szórja a flakonba, tölts meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 240 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse.

**Hipertóniás (magas sótartalmú) oldat** – 2 tasak tartalmát szórja a flakonba, majd tölts meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 240 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse. Nyhe, égető érzés jelentkezhet az orr öblítése után.


Az orr- és a melléküregek öblítése után, a flakont és a feltétjét gondosan meg kell tisztítani. Csak a készletben található flakont használja az öblítéshez. Ha a flakon eltörik vagy deformálódik, illetve három havi használat után újra kell cserélni. A **ClinSin med** orvostechnikai eszközt várandós és szoptató kismamák is használhatják.

A ClinSin med orvostechnikai eszköz nem érinti az autózvezetési és gépek üzemeltetési képességeket.


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

**FIGYELMEZTETÉS** –csak az eredeti és tiszta flakonnal szabad öblögetni (minden használat után a feltéttel együtt meg kell tisztítani a fertőzés elkerülése érdekében).


I. Szórja 1 tasak tartalmát (izotóniás oldathoz) vagy 2 tasakot (hipertóniás oldathoz) a palackba, tölts meg felforralt (de már nem forró) meleg vízzel, amíg eléri a 240 ml jelzést.

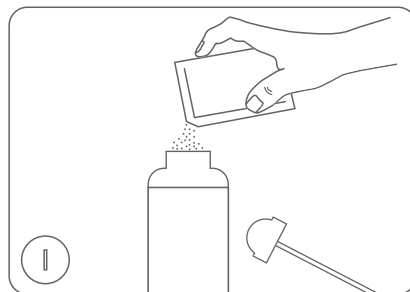

II. Zárja le precízen a flakont, fedje le az ujjával a feltétlen lévő nyílást és rázogassa a tartályt tiszta oldat keletkezéséig.

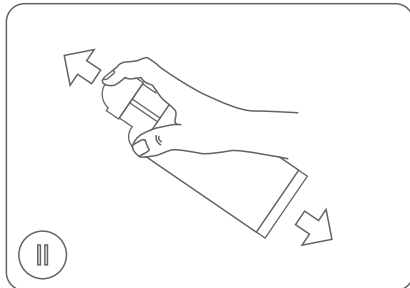

III. Hajoljon mosdókagyló vagy egy mosdótál fölé és helyezze az egyik orrnyílásba a flakon feltétjét. Szájon át történő könnyed légzés közben nyomja össze óvatosan a flakont, hogy az oldat 50%-a bejusson az orrnyílásba. Ne nyomja össze a másik orrnyílást, mivel annak nyitva kell maradnia, hogy a víz és a különböző váladékok távozhassanak az orrból. Az oldat másik 50%-t a másik orrnyílásba alkalmazza, és ismétlje meg az előbbi teljes eljárást.  
**NE NYELJE LE AZ OLDATOT!!!**

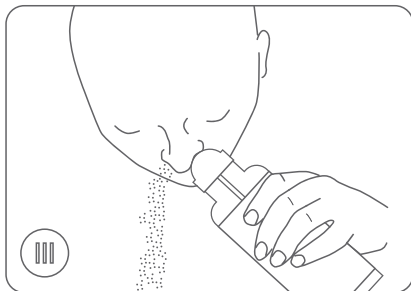

IV. Mindkét orrnyílás öblítése után fújja ki az orrát és zsebkendővel törölje meg.  
Öntse ki a maradék oldatot. Készítsen minden alkalommal új oldatot, amikor öblögetni kívánja az orrát vagy a melléküregeket.



#### ÖSSZETEVŐK:

Minden **ClinSin med** tasak 2,16 g nátrium-kloridot tartalmaz.

#### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Ne használja, ha allergiás a hatóanyagra. Nem szabad a készletet használni teljesen eldugult orr, orrsövényferdülés, fülfertőzés esetén. Ne használja a lejárati idő után. Orrműtéten átesett betegek esetében a készlet használata előtt konzultálni kell a kezelőorvossal. Ne öblögesse az orrát vagy a melléküregeket forró vagy nem felforralt csapvízzel. Ne használja a ClinSin-t idegen tárgyak eltávolítására a gyermek orrnyílásából.

#### HOL ÉS HOGYAN KELL A TERMÉKET TÁROLNI:

Gyermekek elől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásban tárolandó, fénytől és nedvességtől védve. Tartsa be a tárolási körülményeket. Ne használja a lejárati idő után.

**FIGYELMEZTETÉS:** Száraz helyen tárolja. Ne tárolja úgy, hogy a feltét a tartályon van. Ne tárolja a száraz alkatrészeket műanyag zacskóban. Ne használja a flakont, ha sérült vagy nem eltávolítható elszíneződések találhatók rajta. A károsodások elkerülése érdekében ne tegye a flakont, a feltétet és a csövet forrásban lévő vízbe.

#### KÖLCSÖNHATÁSOK:

Nem ismertek.

#### ORVOSI BALESETEK:

Nem jeleztek balesetet megfelelően használt készlet esetében.

#### Csomagolás tartalma:

A **ClinSin med** orr- és melléküregöblítő készlet 12 év feletti gyerekek és felnőttek számára orröblítő flakontól és 16 db oldatkészítésre alkalmas portartalmú tasakból (2,16 g/db) áll.

#### Orvostechnikai eszköz



#### Gyártja:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.  
ul. Podstoczysko 30  
07-300 Ostrów Maz.  
Lengyelország

#### Forgalmazza:

Naturprodukt Ft.  
2046 Törökbálint  
DEPO, Pf. 8  
www.naturprodukt.hu

Csomagoláson található szimbólumok:



gyártási szám



lejárati idő



gyártó



olvassa el a használati útmutatót



tárolás 15°C – 25°C

**Használati útmutató kibocsátásának dátuma:** 2016/09